

TRIM

あなたを占める

70%のおよその水分量

質が重要です。

NEW! One Way Type



水道直結連続生成型電解還元水整水器
TRIM ION H-1

管理医療機器クラス2
医療機器製造販売承認番号:21500BZZ00119A02

■効能又は効果

- 胃腸症状の改善
- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の動きを助け、お通じを良好にします。

本体標準価格 ¥312,900 (取扱価格 ¥298,000)

からだにいい水、
おいしい水。
還元水で健康宣言。


酸性水ノズルがついて
新登場!

還元水について少しでもお話を…

水を構成する「酸素」と「水素」は通常切り離せませんが、電気分解という方法を用いて切り離し、原子状の酸素を含む水(酸性水)と、原子状水素を含む水(還元水)とを取り出すことができます。どちらも利用価値があり、ことに還元水は体にやさしい飲料水として優れた能力を有します。

水 H_2O を
効率良く電気分解

水分子の水素を使い、
原子状水素を豊富に
含ませて還元水が作
られます。

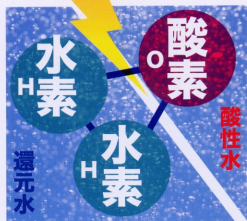

酸化と還元

酸化とは

酸素と化合すること。
水素を失うこと。
電子を失うこと。
例:鉄などを錆びさせる。

還元とは

酸素と化合すること。
酸素を失うこと。
電子を得ること。
例:鉄などを錆びさせない。



還元

還元1

胃腸に負担をかけないから毎日の飲み水や水出し茶に。

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。また、胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。水のままでお茶がよく出るので、水出し茶にもお使いいただけます。



還元2

ふっくらおいしく…
毎日のご飯の炊き水に。

電解還元水でご飯を炊くと、炊き上がりがふっくらで、おいしくなります。



トリムイオンの還元水 元気なからだ・美味しい料理

飲用・お料理・洗顔に1台で3つの水。
くらしに合わせてお使いください。



TRIM TRIM ION H-1 NEW! One Way Type
水道直結連続生成型電解還元水整水器
管理医療機器製造販売承認番号: 215009Z00119A02

水を征する。

—還元水はまだまだ進化し続ける—

トリムイオンは、水道水を浄化し残留塩素を取り除いた後、電気分解を利用して抗酸化性をもった還元水を効率良く生成します。みずみずしい生活にお役立て下さい。

電源スイッチ



還元水

電気分解することにより、電解槽の陰極側には水素が発生し、還元性を持った浸透圧の高い水が生成されます。カルシウム等を多く含んだ身体にやさしい還元水の水です。

浄水

残留塩素だけでなく、溶解性鉛も取り除く新機能のカートリッジを採用。水道水を雑菌等のないクリーンな水に変えます。薬の飲用や赤ちゃんのミルクにお使いください。

酸性水

電解酸性水は電解槽の陽極側に酸素が発生することによって生成される、マイナスイオンを含んだ酸性の水です。洗顔や洗い物にお使いください。

大きく見やすい親切設計のタッチスイッチ。

水

浄水

酸性水

還元3

くつろぎタイムの緑茶・紅茶・コーヒーに

おいしい水は緑茶・紅茶・コーヒーの味を引き立てます。

還元液

煮物やアク抜きに…調理用としてお使いください。

ダシがよく取れ、煮物の素材をふっくらとやわらかく仕上げます。また、調理素材のアク抜きにもお使いいただけます。

浄水

薬/ミルク

ミルクや薬の服用に。塩素系の不純物が含まれていない安全な水です。赤ちゃんのミルクや薬の服用にお使いください。

酸性水

洗顔

酸性水は洗顔に。電解酸性水は電解槽の陽極側で生成される酸性の水です。洗顔にお使いいただけます。

洗い物

酸性水は食器などの洗い物にも適しています。




「ダブルオートチェンジ クロスライン方式」でより安定した電解還元水を生成します。

TRIM ION H-1

ダブルオートチェンジ クロスライン方式

電解還元水生成器は水を電気分解して電解還元水を生成しますが、生成時に水の中に含まれているミネラル等が電極に引き寄せられてメッキ状態になります。電極にミネラルがたかふたか付きますと生成が出来なくなります。トリムイオンは常に電極をきれいに保つため、オートチェンジクロスライン方式を採用していますので安定した性能で長時間お使いいただけます。

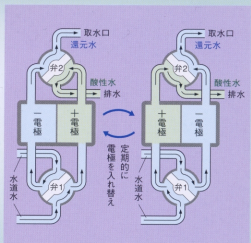

残留塩素・溶解性鉛や雑菌除去機能の複合浄水カートリッジ

水道水に含まれる残留塩素や鉛等から容れられる溶解性鉛を除去してくれます。更に、中空糸膜の採用で、雑菌なども除去してくれます。

標準価格 ¥13,125
(税込価格 ¥12,500)



■付属品


- 水道水蛇口用分岐水栓・各種アダプター付き
- 吸盤
- 給水ホース(シングルタイプ)1.5m
- 壁掛用ビス
- 排水用ホース(シングルタイプ)1m
- pH指示薬フェノールフタレイン溶(10cc)
- 乳酸カルシウム(30g)
- ホース固定用バンド




■蛇口分岐水栓についてのご注意

水道水蛇口分岐水栓は、ご家庭のほとんどの蛇口に取付けが可能です。下図のような一部特殊形状の蛇口に取付けができません。下図を参考に蛇口の形状をお確かめください。

- センサー付蛇口
- 蛇口の形が特殊なもの

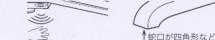

- 規格外サイズの蛇口
- シャワー付き蛇口

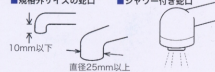


【付属品】酸性水ノズル
酸性水ノズルを利用することにより、酸性水を便利に取り出すことができます。

標準価格 ¥2,100
(税込価格 ¥2,000)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。


●お探め、お問い合わせは

TRIM ION H-1 電解システム

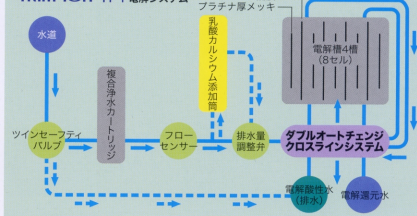

電気分解の原理

電解質(ミネラルイオン等)を含む水に電流を流すと自発的には起こらない酸化・還元反応が電気エネルギーによって起こり、陰極側では酸化された水が、陽極側では還元された水がそれぞれ生成されます。

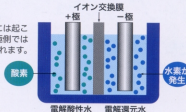

■主な仕様

- 医療用器具製造承認番号: 21500BZ00119A02 ●定格電圧: AC100V ●定格電流: 50/60Hz ●定格電流: 3A (5A max.) ●電解生成電圧: 70V(max.) ●電解槽: 4槽 (8セル) ●電極: プラチナ厚メッキ ●生成水取水方式: 1ウェイ方式 ●定格生成量: 還元水5.5リットル/分(max.)、酸性水5.5リットル/分(max.)、浄水6.5リットル/分(max.) ●入水圧力: 0.5~7.0kg/cm² ●本体重量: 5kg ●本体寸法: 約2m ●本体寸法: 271(W)×367(H)×135(D) ●乳酸カルシウム添加装置 ●浄水カートリッジ寿命: 残留塩素処理能力14トン(水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日38リットル使用した場合で12ヵ月間使用できます) ●電解槽洗浄: ダブルオートチェンジクロスライン方式 ●電源回路: スイッチングレギュレーター制御方式 ●本体保護回路: ヒューズBA/定電流制御回路/加圧防止装置

⚠安全注意事項

- 本機は水道水など飲用に合格した水を対象にしています。
- 取り出すのは、酸性水やpHの高い「薬液」用の水は取らないでください。体調を損なう恐れがあります。
- 病歴や病中の方、持病のある方、肝臓・腎臓に障害のある方は、医師または、薬剤師にご相談ください。
- お肌の弱い方、アレルギー体質の方が酸性水(アストリンゼント)を使用する場合は、医師または薬剤師にご相談してから指示に従ってご使用下さい。
- 金魚や熱帯魚などの飼育水には使用できません。

総発売元

Sankei 株式会社 サンケイコーポレーション
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目2番地36号
麹町新ビル2F
Tel. 03-3288-7340 Fax. 03-3288-7341
URL: http://www.sankeico.jp



製造販売元

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー